

# PROJETO TELESSAÚDE

## Procedimento para Gerar e Transmitir ECG.

- **Gerar arquivo ECG**

1. Abra o programa **“Wincardio 6.0”** que se encontra no desktop do seu computador;
2. No canto esquerdo da tela clicar na opção **“Novo”**;
3. O programa abrirá a tela **CADASTRO – Paciente/Exame**, clicar na opção **“Novo Paciente”**;  
OBS: Se o paciente já está cadastrado no sistema clicar em **“Novo Exame”**;
4. Preencher somente os campos **“Nome, Sexo e Data de Nascimento”** e clicar em **“Salvar e Novo Exame”**;
5. Na tela **“IDENTIFICAÇÃO DO EXAME”**, não é necessário preencher os campos, clicar em **“OK”**;
6. Posicionar o paciente na posição mais confortável possível, para que se coloquem os eletrodos nos locais adequados;
7. Posicionado os eletrodos esperar que os batimentos estabilizem, formando assim uma frequência contínua;
8. Ao lado direito do programa clicar no botão **“Registrar ECG”, (Primeiro ícone da fileira)**;  
OBS: Acima deste ícone mostrará o número de registros coletados do paciente cadastrado. **Exemplo: “2 Reg”**, se acaso clicássemos duas vezes no botão **“Registrar ECG”**;
9. Após coletado os registros de ECG, clicar em **“Salvar” (lado esquerdo do programa embaixo do botão “Novo”)**;
10. Retire os eletrodos do paciente a menos que queira monitorá-lo;
11. Em seguida, na barra de ferramentas do programa **“Wincardio 6.0”**, clicar em **“Exame=> Imprimir”**;

## PROJETO TELESSAÚDE

12. Em seguida, na barra de ferramentas do programa **“Wincardio 6.0”**, clicar em **“Exame=> Exportação => Exame Completo”**;
13. Na tela **“EXPORTAR EXAME”** o programa já nomeará o arquivo com o nome do paciente;  
**OBS: Notificar – se do caminho onde o programa está salvando o arquivo, para que depois você encontre o arquivo que salvaremos agora. Clicar em “SALVAR”**;
14. O programa Wincardio 6.0 já pode ser finalizado.

- **Transmitir Arquivo Gerado**

1. Informar no campo link: ***gesto.com.br/hufm***  
***login: user***  
***senha: na13***
2. Na barra de ferramentas do programa, clicar no botão **“Pacientes”** posicionado no topo da tela;
3. O programa abrirá a tela **“Procurar Exame”**;
  - 5.1 Se o paciente não tiver cadastro no sistema clicar em **“Novo”** e seguir para o **“PASSO 6”**;
  - 5.2 Se o paciente já estiver cadastro no sistema, preencher o campo **“Nome do Paciente”** e clicar em **“Procurar”**;
  - 5.2.1 O programa abrirá a tela **“Lista de Pacientes”** com o nome pesquisado, clicar no ícone (coração) que informa **“Novo Exame”** e seguir para o **PASSO 7**;
6. No campo **“Dados Pessoais do Paciente”**, informar os campos que o programa pede e clicar no botão **“Inserir e Registrar Exame”**;
7. O programa abrirá a tela **“EXAME”**, informar os campos clínicos (IMPORTANTE!!) e clicar no botão **“Arquivo”** no final da tela;
8. O programa abrirá a tela **“Enviar Arquivo”**, localizar o arquivo gerado no procedimento e clicar em **“Abrir”**;

## PROJETO TELESSAÚDE

- 9 Voltando a tela “**EXAME**”, o campo “**Anexar arquivo do Eletrocardiograma:**” deverá estar preenchido com o caminho do arquivo ECG salvo anteriormente no procedimento então clicar no botão “**Inserir**”;
- 10 O programa abrirá a tela “**Lista de Exames**”, com o nome do paciente que acabamos de cadastrar e o status do processo de resposta do Laudo, aguarde até que o status seja igual a “**Concluído**”;
- 11 Após site atualizado e status igual a “**Concluído**”, clicar no ícone (lupa) que informa “**Laudo Exame**”;
- 12 O programa abrirá a tela “**Laudo**”, clicar em “**Imprimir**”, para visualizar o laudo gerado;
- 13 O Programa apresentará o Laudo do exame possibilitando o usuário imprimir ou salvar o arquivo.